



Восстановление дренажа по свищевому ходу с помощью Набора Ившина™

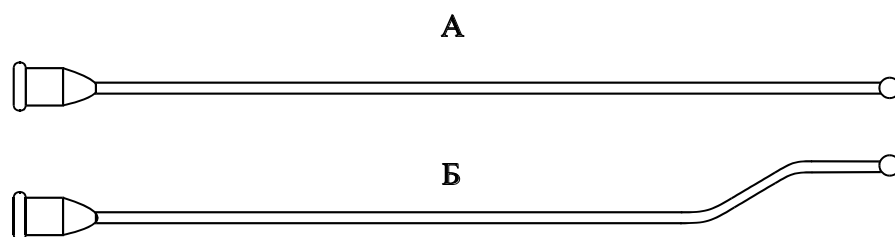

Устройство для установки дренажа по свищевому ходу. А – прямое, Б – изогнутое.

Если, несмотря на предпринятые меры профилактики, дренаж выпал, выполняют попытку его восстановления по свищевому ходу. Для проведения проводника по свищевому ходу разработаны специальные устройства, выполненное в виде полый трубки, имеющей утолщение рабочем на конце. Устройство может быть прямым или иметь два изгиба на рабочем конце.

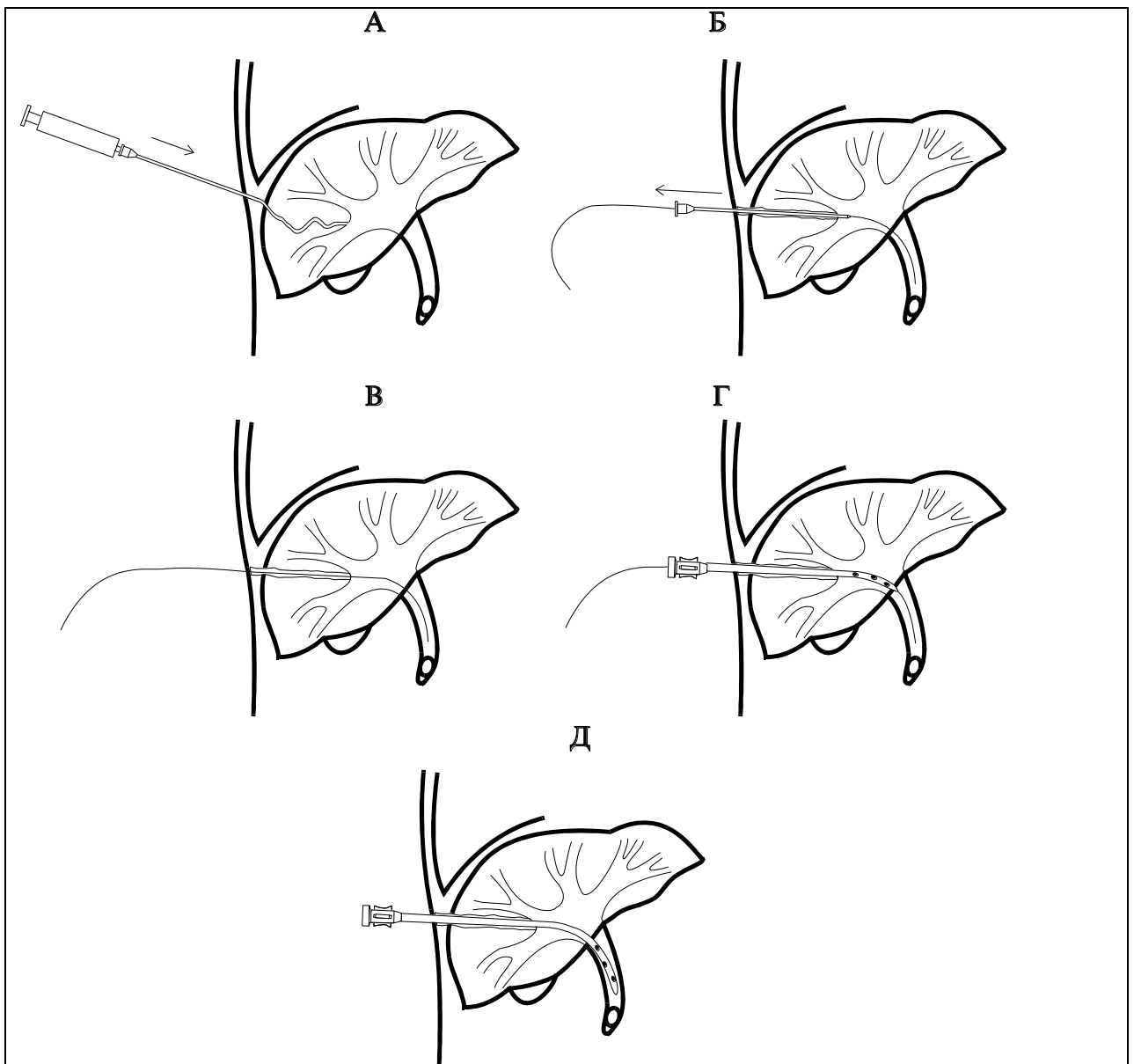

Рабочий конец устройства ввести в свищевое отверстие на коже (А). Свищевой ход заполнить водорастворимым контрастным веществом, оценить длину, направление и наличие изгибов. Под рентгеноскопическим контролем устройство осторожно продвигать по каналу (Б). Высокая жесткость инструмента и наличие оливы на конце позволяет преодолеть свищевой ход любой конфигурации. При попадании устройства в проток через его просвет вводят проводник. Устройство удаляют (В), и по проводнику вводят катетер (Г). Проводник извлекают и фиксируют катетер к коже (Д).